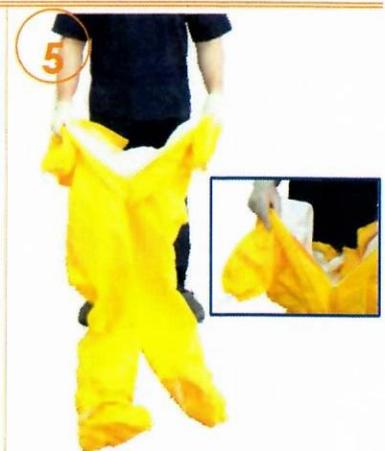
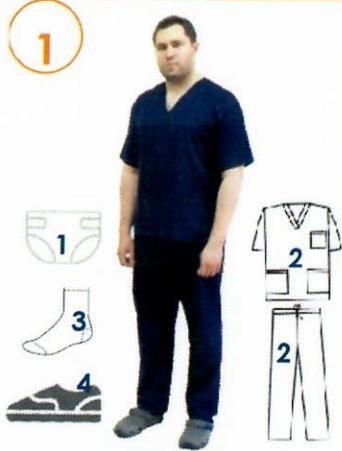


**АЛГОРИТМ НАДЕВАНИЯ ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА И СИЛОВЫХ ОЧКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В В
ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 г.УФА**

Утвердила
Разработала

Баширова Т.В
Яркеева Э.Р

Предварительно приняв гигиенический душ, надеть нательное белье:

- подгузник (1)
- пижаму/нательный костюм (2)
- носки (3)
- медицинскую обувь (4)

Надеть первую пару нестерильных перчаток
*Проверить целостность воздухом

Надеть шапочку
*Волосы и уши должны быть закрыты шапочкой

Надеть респиратор:

- приложить респиратор к лицу, взяв его с внешней стороны одной рукой
- перекинуть резинки респиратора за тыльную сторону руки - натянуть нижнюю резинку другой рукой на основание черепа
- натянуть верхнюю резинку другой рукой на затылок - **проверить респиратор на утечку** (выполнить 2-3 вдоха/выдоха, убедиться в отсутствии подсоса и выхода воздуха по краям респиратора, что на вдохе респиратор прилегает к лицу без утечки воздуха)

*Надеть очки с душками перед надеванием комбинезона

Расправить комбинезон, захватив правой рукой правый манжет и правый край замка, левой рукой – левый манжет и левый край замка
*Использовать комбинезон своего размера



**Надеть
брючины
комбинезона**



**Надеть рукава
комбинезона,
накинуть на
большой
палец петлю-
напальчник
**Перчатки
заправить под
рукава
комбинезона***



**Надеть
капюшон**



**Застегнуть молнию
комбинезона**



**Прикрыть
застегнуту
ю молнию**
правой
защитной
планкой

**Смотри
продолжение**



Путем **визуального осмотра** себя в зеркале убедиться, что **элементы защитного костюма надеты правильно**:
- отсутствуют непокрытые кожные покровы и зазоры между элементами СИЗ, костюма

Прикрыть застегнутую молнию левой защитной планкой и воротником

Надеть защитные очки: - взять очки с внешней стороны одной рукой - перекинуть резинку очков за тыльную сторону руки - приложить очки к лицу - натянуть резинку другой рукой на затылок
**Очки с душками надеваются перед надеванием комбинезона под капюшон*

Надеть перчатки поверх рукавов комбинезона
**Проверить целостность воздухом*